



EXCELLENCE

MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS

Cod. **207809**



INFORMAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

APRESENTAÇÃO	5 pacotes com 10 máscaras
LARGURA FECHADA (mm)	175 mm
ALTURA FECHADA (mm)	93 mm
COR	Azul
CÓDIGO EAN-13	789 60619 7809 8

INFORMAÇÃO TÉCNICA DE EMBALAGENS

MÁSCARAS x CARTUCHO	50
CARTUCHOS x CAIXA	18
PALETIZAÇÃO	7 caixas por lastro x 5 camadas
CUBAGEM (m³)	0,0380 m³
PESO LÍQUIDO (kg)	3,0 kg
PESO BRUTO (kg)	4,0 kg
COMPRIMENTO (mm)	453 mm
LARGURA (mm)	313 mm
ALTURA (mm)	268 mm
CÓDIGO DUN-14	1 789 60619 7809 5

CERTIFICAÇÕES

- Produto notificado**
ANVISA nº 82084510001
 • Resolução ANVISA/MS 343/05

INSTRUÇÕES DE USO:

Lave as mãos com água e Sabão Elite Professional antes de tocar na máscara.	Se necessário, para seu maior conforto, e possível afrouxar a orelha elástica. Coloque os dedos dentro do arco da orelha e os afaste delicadamente. Segure os dedos abertos por alguns segundos. Nunca puxe o arco da orelha, pois poderá danificá-lo.	Segure a máscara pelas orelhas elásticas e posicione-a à altura do nariz.	Passar as orelhas elásticas atrás das orelhas.	Ajuste a máscara à altura do nariz utilizando o clipe nasal e certifique-se de que ela cubra o queixo.	Evite tocar na máscara quando ela estiver colocada.	Retire a máscara removendo as orelhas elásticas de trás das orelhas.	Cortar orelhas elásticas.	Descarte a máscara colocando-a em um saco plástico, fechando-o e jogando-o fora.	Higienize as mãos com Álcool Gel Elite Professional .