



CLASSIC

MÁSCARA DESCARTÁVEL

Cod. **207815**



+80%
de
Filtração de bactérias



INFORMAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

APRESENTAÇÃO	8 máscaras
LARGURA FECHADA (mm)	175 mm
ALTURA FECHADA (mm)	93 mm
COR	Branco
CÓDIGO EAN-13	789 60619 7815 9

INFORMAÇÃO TÉCNICA DE EMBALAGENS

MÁSCARAS x CAIXA	32 cartuchos de 8 máscaras
PALETIZAÇÃO	10 caixas por lastro x 17 camadas
CUBAGEM (m³)	0,0113 m³
PESO LÍQUIDO (kg)	0,494 kg
PESO BRUTO (kg)	0,816 kg
COMPRIMENTO (mm)	468 mm
LARGURA (mm)	223 mm
ALTURA (mm)	108 mm
CÓDIGO DUN-14	1 789 60619 7815 6

Atende a recomendação da **ABNT PR1002: 2020**

INSTRUÇÕES DE USO:



Lave as mãos com água e **Sabão Elite Professional** antes de tocar na máscara.



Se necessário, para seu maior conforto, é possível afrouxar a orelha elástica. Coloque os dedos dentro do arco da orelha e os afaste delicadamente. Segure os dedos abertos por alguns segundos. Nunca puxe o arco da orelha, pois poderá danificá-lo.



Segure a máscara pelas orelhas elásticas e posicione-a à altura do nariz.



Passar as orelhas elásticas atrás das orelhas.



Ajuste a máscara à altura do nariz utilizando o clipe nasal e certifique-se de que ela cubra o queixo.



Evite tocar na máscara quando ela estiver colocada.



Retire a máscara removendo as orelhas elásticas de trás das orelhas.



Cortar orelhas elásticas.



Descarte a máscara colocando-a em um saco plástico, fechando-o e jogando-o fora.



Higienize as mãos com **Álcool Gel Elite Professional**.